



КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ

IONTO-MESOsono

МЕЗОТЕРАПИЯ + УЛЬТРАЗВУК =
ЭФФЕКТИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО РОСЗДРАВНАДЗОРОМ



Производство: Ionto Health and Beauty GmbH, Германия
Компания ICG – эксклюзивный представитель IONTO в России



ISO CE

MESOsono – это инновационная комбинация, сочетающая мезолечение, с использованием ручки Meso со стерильными одноразовыми картриджами с иглами, и лечение ультразвуком.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

IONTO-MESOsono предназначен для воздействия на кожу лица, шеи, декольте и тыльной поверхности кистей рук.

ЭФФЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ:

- разглаживание морщин;
- лифтинг кожи;
- стимуляция обновления клеток;
- восстановление водного баланса кожи;
- улучшение клеточного метаболизма;
- повышенная абсорбция активных веществ, в связи с этим увеличивается действие выбранных косметических средств;
- активация и улучшение местного кровообращения;
- противовоспалительное действие.



Принцип действия MESOsono

ВОЗДЕЙСТВИЕ MESO

На первом этапе процедуры производится обработка выбранной зоны ручкой Meso. Одноразовый стерильный картридж необходимо установить в ручку Meso. В рабочей части сменной головки расположены 18 пластиковых «пиков» (микроиглы), которые проникают на 2–5 мм внутрь кожи (глубина проникновения микроигл подбирается индивидуально, в зависимости от толщины кожи на различных участках – изменяется поворотом кольца на ручке). Внутри картриджа микроиглы движутся в разных направлениях и легко адаптируются к форме лица. Микроиглы обеспечивают мягкое и бережное проникновение через кожный барьер.



ВОЗДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАЗВУКОМ

Второй этап – ультразвуковая обработка на частоте 3 МГц или 1 МГц, способствующая усилению пенетрации, эффективной работе активных ингредиентов применяемых косметических средств, улучшению микроциркуляции, активизации клеточного метаболизма и другим процессам. Последующая обработка ультразвуком манипулой (с поверхностью 2,5 см²) повышает однородное поглощение активных веществ в кожу (фонофорез) для достижения долгосрочного эффекта.



Преимущества MESOsono

КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: аппарат IONTO-MESOsono сочетает в себе 2 косметологические методики: мезолечение и воздействие на кожу ультразвуком 3 МГц и 1 МГц. Такое сочетание позволяет добиться лучших результатов воздействия.

ГОТОВЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАБОТЫ: 6 встроенных программ для работы по лицу, шее, декольте, рукам. Возможность настроить и сохранить до 24 индивидуальных программ работы для ваших клиентов.

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ: удобный интерфейс, управляемый с помощью цифрового дисплея. Для контроля корректного контакта ультразвуковой манипулы с поверхностью кожи аппарат оснащен звуковой и светодиодной индикацией.

КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ: оборудование компании Ionto Comed разрабатывается, производится и собирается в Германии, что гарантирует высочайшую техническую надежность и безопасность.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНИЧНОСТЬ: манипула для ультразвука высокого качества, имеет эргономичный дизайн, легко дезинфицируется. Ручка MESO комплектуется сменным персональным картриджем индивидуально для каждого клиента. Одноразовые картриджи упакованы отдельно для гарантии безопасности и гигиеничности.

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ: аппарат IONTO MESOsono имеет международные сертификаты качества (ISO, CE) и регистрационные удостоверения Росздравнадзора РФ.

МЕТОДИКИ, используемые в аппарате MESOsono, активно применяются для всех типов кожи, независимо от возрастных особенностей. Ниже приводятся наиболее востребованные программы лечения*.

1. Обезвоженная кожа

Показания: сухость, чувство стянутости, шелушение, мелкие поверхностные морщины, после активной инсоляции. Для МЕЗОлечения и фонофореза используйте ампулу арт. 38519 «Увлажнение».

Воздействие ультразвуком:

Технология	Частота	Плавная регулировка интенсивности	Рабочий цикл	Длительность
ультразвук	3 МГц	0,5-0,6 Вт/см ²	1:2	15 мин

Рекомендуемый курс: 5-8 процедур 1-2 раза в неделю, поддерживающие процедуры 1 раз в 2 месяца.

2. Преждевременное старение

Показания: увлажнение, борьба со свободными радикалами, стимуляция синтеза коллагена и эластина. Для МЕЗОлечения и фонофореза используйте ампулу арт. 38519 «Увлажнение» или арт. 38523 «Омоложение».

Воздействие ультразвуком:

Технология	Частота	Плавная регулировка интенсивности	Рабочий цикл	Длительность
ультразвук	3 МГц	0,4-0,5 Вт/см ²	пост.	10-15 мин

Рекомендуемый курс: 6-10 процедур 1-2 раза в неделю, поддерживающие процедуры 1 раз в 2 месяца.

3. Атрофичная кожа

Показания: стимуляция деления клеток, улучшения лимфо- и кровотока, действия на соединительную ткань. Для МЕЗОлечения и фонофореза используйте ампулу арт. 38519 «Увлажнение».

Воздействие ультразвуком:

Технология	Частота	Плавная регулировка интенсивности	Рабочий цикл	Длительность
ультразвук	1 МГц	0,3 Вт/см ²	пост.	10 мин

Рекомендуемый курс: 8-10 процедур 1-2 раза в неделю, поддерживающие процедуры 1 раз в 2 месяца.

4. Купероз

Показания: расширенные сосуды кожи. Для МЕЗОлечения и фонофореза используйте ампулу арт. 38528 «Для кожи с куперозом».

Воздействие ультразвуком:

Технология	Частота	Плавная регулировка интенсивности	Рабочий цикл	Длительность
ультразвук	1 МГц	0,3 Вт/см ²	1:10	10 мин

Рекомендуемый курс: 8-10 процедур 1-2 раза в неделю, поддерживающие процедуры 1 раз в 2 месяца.

5. Жирная кожа, склонная к акне

Показания: повышенное выделение кожного сала, ослабленная кожа, дисбаланс работы сальных желез, высыпания. Для МЕЗОлечения и фонофореза используйте ампулу арт. 38641 «Очищающие для жирной и комбинированной кожи».

Воздействие ультразвуком:

Технология	Частота	Плавная регулировка интенсивности	Рабочий цикл	Длительность
ультразвук	3 МГц	0,5-0,6 Вт/см ²	1:10	10-15 мин

Рекомендуемый курс: 6-10 процедур, 1-2 раза в неделю, поддерживающие процедуры 1 раз в 2 месяца.

6. Рубцы от акне

Показания: атрофические рубцы после высыпаний, застойные пятна. Для МЕЗОлечения и фонофореза используйте ампулу арт. 38528 «Для кожи с куперозом».

Воздействие ультразвуком:

Технология	Частота	Плавная регулировка интенсивности	Рабочий цикл	Длительность
ультразвук	3 МГц	0,5-0,6 Вт/см ²	1:2	10-15 мин

Рекомендуемый курс: 10-15 процедур 1-2 раза в неделю, поддерживающие процедуры 1 раз в 2 месяца.

7. Возрастные изменения

Показания: морщины, дряблая кожа, снижение тургора кожи, снижение выработки коллагена и эластина, усталый вид. Для МЕЗОлечения и фонофореза используйте ампулу арт. 38523 «Омоложение», арт. 38519 «Увлажнение».

Воздействие ультразвуком:

Технология	Частота	Плавная регулировка интенсивности	Рабочий цикл	Длительность
ультразвук	3 МГц	0,4-0,5 Вт/см ²	пост.	15 мин

Рекомендуемый курс: 8-10 процедур 1-2 раза в неделю, поддерживающие процедуры 1 раз в 2 месяца.

8. Чувствительная кожа

Показания: повышенная чувствительность кожи к различным раздражителям, краснота, сухость. Для МЕЗОлечения и фонофореза используйте ампулу арт. 38519 «Увлажнение».

Воздействие ультразвуком:

Технология	Частота	Плавная регулировка интенсивности	Рабочий цикл	Длительность
ультразвук	3 МГц	0,4-0,5 Вт/см ²	пост.	10-15 мин

Рекомендуемый курс: 6-10 процедур 1-2 раза в неделю, поддерживающие процедуры 1 раз в 2 месяца.

* Курсы процедур разработаны с использованием французской косметики Bernard Cassière (для примера), www.bcparis.ru
Вы можете использовать мезолечение и ультразвуковое воздействие отдельными процедурами.

Расчет окупаемости аппарата IONTO-MESOsono

Загрузка аппарата	1 процедура в день	3 процедуры в день	5 процедур в день
Стоимость аппарата, евро	4 918	4 918	4 918
Рекомендованная минимальная стоимость процедуры, евро	50	50	50
Количество рабочих дней в месяце	30	30	30
Количество процедур в месяц	30	90	150
Совокупный доход в месяц, евро	1 500	4 500	7 500
Стоимость расходных материалов на одну процедуру (ампула + сменный картридж), евро	11	11	11
Стоимость расходных материалов в месяц, евро	330	990	1 650
Зарплата специалистов (20%) в месяц, евро	300	900	1 500
Прибыль в месяц, евро	870	2 610	4 350
Срок окупаемости (мес.)	5,7	1,9	1,2



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частота воздействия	1 МГц, 3 МГц
Напряжение	230 Вт / 50–60 Гц
Мощность	66 Вт
Размеры (Ш × В × Д)	34 см × 14 см × 22,5 см
Вес	3,7 кг
Гарантия	12 месяцев



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ САЛОНОВ КРАСОТЫ, МЕДИЦИНСКИХ И SPA-ЦЕНТРОВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

191187, ул. Чайковского, 37
Тел./факс: (812) 337-5257
(812) 655-6495

МОСКВА

121087, ул. Баркляя, 6, стр. 3, офис 204
Тел.: (499) 272-1741, (495) 229-3770
Факс: (499) 788-6140

ЕКАТЕРИНБУРГ

620137, ул. Блюхера, 45
Тел.: (343) 369-8438
Факс: (343) 369-8470

www.icg-group.ru
www.ionto.ru
www.estheline.ru